

# VIelfÄLTIG

# GESICHTS-SCHILD

Unterstützung beim Schutz gegen das COVID-19 Virus



PROTECTIVE  
GEAR  
powered by GROB AIRCRAFT



MADE IN GERMANY  
BY GROB AIRCRAFT SE



## Inhaltsstoffe:

Rahmen: Polypropylene

Schild: PET-G - Polyethylenterephthalat Glycol

Kopfband: Thermoplastisches Elastomer

Schaum-Material: Geschlossenzelliger Polyvinylchlorid-Schaum

Schaum-Material Kleber: Acrylat-Dispersion, Lösungsmittelfrei

## Inhalt:

Kopfgestell x 1, Schutzfolie x 1,

Befestigungsband x 1, Stirnpolsterung x 1

Einheitsgröße des Schildes: 320x245mm, Dicke: 0,3mm

## Rahmen:

- Individuell anpassbar • Nach medizinischem Standard ISO 10993-5 geprüft • Frei von tierischen Inhaltsstoffen • Verformungsresistent nach DIN ISO 815 • Nach den Regularien von 2023/2006/EC geprüft


## Transparenter Schild:

- BfR-Empfehlung XVII • Verwendetes PET-G biokompatibel gemäß Tests d. US-Pharmacopeia (USP) Klasse VI & ISO 10993 • In Übereinstimmung mit EU 2011/65 (RoHS), EC 1907/2006 (REACH), EC Regulation 10/2011, EC Regulation 1935/2004 • Nachhaltig produziert

## Aufbauanleitung:



**Step 1:** Ziehen Sie die Folie der Stirnpolsterung ab und bringen Sie diese mittig auf der zum Kopf zeigenden Innenseite des Gestells an.

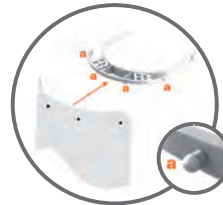

**Step 2:** Drücken Sie das Schild mit den Löchern auf die an der Vorderseite des Gestells angebrachten Halterungen.



**Step 3:** Befestigen Sie das Gummiband beidseitig an der vorgesehenen Halterung des Bügels.

**Reinigungsinformationen:** Bevor Sie eine Desinfektionslösung auf das Schild auftragen, probieren Sie diese zuerst an einer unauffälligen Stelle aus! Sollten Sie nach einer Weile keine Beschädigungen des Schildes feststellen, dann eignet sich das Desinfektionsmittel für eine flächendeckende Anwendung. Zuerst sollten Sie das gesamte Schild und das Kopfgestell kurz unter lauwarmem, fließendem Wasser abspülen. Trocknen Sie die Bestandteile dann ab. Es wird empfohlen, den Schild anschließend komplett in Desinfektionsmittel zu tauchen. Sollte das nicht möglich sein, dann kann auch ein Spray verwendet werden. Tragen Sie das Mittel auf und reinigen Sie das Schild mit einem sauberen Tuch. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal. Bitte beachten Sie, dass das Schild kontaminiert sein kann. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Hände, die Oberfläche auf der Sie die Reinigung vorgenommen haben, sowie alle Kontaktgegenstände vor und nach der Reinigung unbedingt desinfizieren.

**Lagerung:** Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung bei Raumtemperatur trocken lagern.

**Entsorgung:** Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden. Bei kontaminierten Produkten sind die Art und das Ausmaß der Kontamination ausschlaggebend für die Entsorgung. Die geltenden Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.

**⚠️ Warnung:** Kein medizinischer Artikel. Ein ausreichender Schutz vor Infektionen ist nicht gewährleistet. Es wird das zusätzliche Tragen eines zertifizierten Mundschutzes dringend empfohlen. Nicht für die folgenden Zwecke geeignet: (1) Zum Schutz gegen mechanische Einwirkung. (2) Zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art. (3) Gegen Funken, Bestrahlung oder ultraviolette Strahlen. (4) Beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten.

WIR SIND GERNE BEREIT,  
IHRE FRAGEN ZU BEANTWORTEN.

PRODUZIERT VON

GROB Aircraft SE  
Lettenbachstrasse 9  
86874 Tussenhausen-Mattsies  
Germany  
covid@grob-aircraft.com

